

150 mm

Código de Barras
Sentido de Lectura
Barcode Read Direction



146

Ainara

gel hidratante vaginal

I. O QUE É AINARA?

Ainara é um gel hidratante mucoadesivo de uso vulvovaginal para o alívio dos sintomas de secura vaginal, atrofia e desconfortos relacionados, que podem ocorrer durante a gravidez, o puerpério, a menopausa ou como consequência da irritação física, química ou da alteração da flora vaginal habitual ou associada ao uso de contraceptivos orais ou outros medicamentos.

A secura vulvovaginal ocorre por uma diminuição da hidratação natural da vagina como consequência de uma redução dos níveis de estrogénios ou como consequência de uma irritação física ou química ou de uma alteração da flora microbiana vaginal habitual. Os desconfortos vaginais mais frequentes são comichão, irritação, ardor e dispareunia (dor durante o ato sexual).

Ainara, devido à presença de moléculas bioadesivas na sua composição, cria uma fina camada hidratante na parede vaginal que humedece a mucosa, sem deixar resíduos nem manchas após a sua aplicação.

Ainara é um gel de base aquosa, sem cheiro, transparente e com uma agradável textura.

Apresenta boa tolerância vaginal.

Compatível com o uso de preservativos.


II. COMO UTILIZAR AINARA?

Lavar as mãos antes e depois da sua aplicação.

Ainara é aplicado no interior da vagina com a ajuda do aplicador, previamente cheio com 1 g de gel.

Recomenda-se a aplicação de Ainara 2 vezes por semana ou pode utilizar-se diariamente se necessário, até 12 semanas. Em caso de persistência dos sintomas, consulte o seu médico.

A seguinte figura representa os componentes da embalagem.

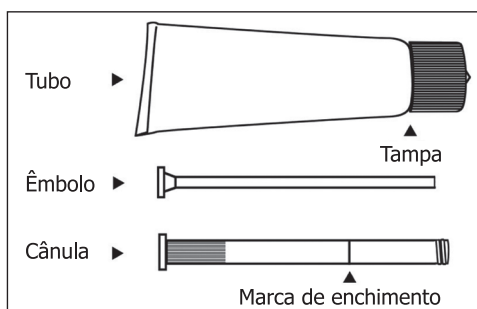

15 mm



135 mm



200 mm

135 mm

15 mm



150 mm

Código de Barras
Sentido de Lectura
Barcode Read Direction



146

1. Desenrosque a tampa do tubo, inverta a tampa e use a ponta bicuda para furar a capa no pescoço do tubo.

2. Retire o aplicador e enrosque-o no tubo.

3. Aperte o tubo para encher o aplicador com o gel até que o êmbolo pare (na marca de enchimento).

4. Remova o aplicador do tubo e coloque a tampa no tubo.

5. Para aplicar o gel, deite-se, insira a extremidade do aplicador profundamente na vagina e empurre lentamente o êmbolo até ao fim.

6. Depois da utilização, retire o êmbolo da cânula e lave-os bem com água para que sejam reutilizados na próxima aplicação.

Ainara pode também ser aplicado na zona perineal (abertura vaginal e zona genital externa adjacente) para aliviar a secura vulvar. Este uso podem também contribuir para facilitar as relações sexuais.

III. O QUE CONTÉM AINARA?

Glicerol (E422), para-hidroxibenzoato de metilo sódico (E219), para-hidroxibenzoato de propilo sódico (E217), poliacróbilo, carbómero, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, água purificada. Sem perfume.

IV. QUAIS OS CUIDADOS ESPECIAIS COM AINARA?

O uso de Ainara está contraindicado em doentes com antecedentes de hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes do produto.

Não ingerir. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lavar abundantemente com água. Manter fora da vista e do alcance de crianças.

Qualquer incidente grave ocorrido com o produto deve ser comunicado ao fabricante (Italfarmaco S.A.) e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

V. COMO CONSERVAR AINARA?

Conservar à temperatura ambiente, longe de fontes de calor direto. Este produto não deve ser utilizado após a data indicada na embalagem.

Este produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada.

VI. APRESENTAÇÃO

Tubo de 30 g acompanhado com aplicador.

Última revisão do texto: 2021/05

Dispositivo Médico



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Manter afastado da luz solar



Consultar as instruções de utilização

FABRICANTE:



ITALFARMACO S.A.
San Rafael 3 28108 Alcobendas (Madrid).



ITFE 2083

211936/02



15 mm

200 mm

135 mm

15 mm

135 mm

15 mm